

Scheda Tecnica

Articolo				
Prodotto	Codifica linea	Formato cm	Colore	Materiale
BAND Mascherina	A2433-M20	33x12	Bianco	Micro
				Spunlace

Mascherina di forma rettangolare, doppio strato, non sterile. Rappresenta una barriera meccanica contro materiali e sostanze.
 Uso: calzare prima dietro ad un orecchio poi l'altro selezionando il foro adatto alla propria taglia, il materiale morbido e confortevole si adatterà alla forma del viso. Veste adulti e bambini, regolabile.

Confezione					
Pacco	Quantità pz	Formato cm	Peso gr	Volume m ³	EAN
	20	16,5x12x4	120	0,0008	8012547160491

Cartone						
Scatola	Marca	Quantità pz	Formato cm	Peso kg	Volume m ³	ITF
		600	38,5x23,5x35	4	0,031	08012547114975

Pallet Epal 120x80 cm							
Pallet	Strato	File	Quantità ct	Peso kg	Volume m ³	Altezza cm	
		10 x 4	40	185	1,49	155	

<p>Articolo prodotto ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020</p> <p>Non è un dispositivo di protezione individuale, non è un dispositivo medico</p>	 <p>Made in Italy</p>	 <p>Raccolta indifferenziata</p>
--	--	---

Nota: misure e pesi determinati meccanicamente, tolleranza +- 5%

Azienda Certificata ISO 9001:2015



Air Clean

Band

MASCHERINE FILTRANTI
MONOUSO

PACK SERVICE
ITALIA

MANUALE D'USO

Band
Mascherina monouso
Cod: A2433-M20

FABBRICANTE

Pack Service S.r.l.
Porcari (Lucca)
www.packserviceitalia.it

DESCRIZIONE DELLA MASCHERINA

L'articolo oggetto del presente manuale è una mascherina filtrante monouso di forma rettangolare, doppio strato, in tessuto non tessuto, non sterile, priva di lattice.

Rappresenta una barriera meccanica contro materiali e sostanze.

Ipoallergenica e traspirante, priva di additivi chimici.

Filtra oltre il 95% di particelle.

Materiale certificato Oeko-Tex Standard 100.

Mascherina filtrante prodotta ai sensi dell'Art. 16 Comma 2 del D.L. 18/2020.

MODALITÀ D'USO

- Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
- Rimuovere la mascherina dalla confezione.
- Le mascherine vanno utilizzate una sola volta in quanto monouso.
- Pratica da utilizzare grazie ai fori per la regolazione della taglia, non ci sono lacci o elastici.
- Indossare la mascherina calzando con la piega verso l'alto, prima dietro ad un orecchio poi dietro l'altro, selezionando il foro adatto alla propria taglia, il materiale morbido e confortevole si adatterà alla forma del viso, vedi disegno.

1



2



3



DATI TECNICI

Materiale: tessuto non tessuto (nonwoven) - Colore: bianco

Dimensioni (mm): 240x330 - Strati: 2

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti nel presente manuale.

Le mascherine non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.

È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo della mascherina da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale.
- L'utilizzo da parte di bambini in attività ludica.
- Applicare il prodotto su parti del corpo diverse dal viso.
- Applicare il prodotto sulla pelle quando è presente una ferita o un'irritazione.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili od allergici ai materiali con cui è realizzato. In caso d'irritazione causata dal prodotto, sospendere immediatamente l'applicazione e consultare un medico.

CONSERVAZIONE

- Conservare in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.

SMALTIMENTO

Al termine dell'utilizzo della mascherina procedere con il suo smaltimento e non riutilizzarlo.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.

I materiali di costruzione delle mascherine non richiedono particolari procedure di smaltimento.

È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati.